

## Indicações

O **ácido gel fosfórico 37%** é indicado para preparação do tecido dental (dentina e esmalte) para adesão de materiais restauradores de uso exclusivo em consultório odontológico.

## Apresentação

Embalagem contendo 03 Seringas de 3g.

## Composição

Água destilada, espessante, ácido fosfórico, corante azul, glicerol e sílica nanoparticulada.

## Instruções de Uso

Preparar a região que será condicionada com o produto (limpar e secar). Aplicar o condicionador ácido na superfície por no mínimo 20 segundos (alguns produtos adesivos possuem o tempo de aplicação definidos pelo fabricante). Após a aplicação retirar o produto utilizando água. Secar o local para iniciar o procedimento

## Advertências e Precauções

- Não permitir que o produto entre em contato com os olhos e pele;
- Caso entre em contato com a pele ou o olho, lavar com água em abundância e não esfregar (procurar um médico imediatamente);
- Produto apenas para utilização profissional, manter longe de quem não possua treinamento adequado;
- Manter longe das crianças;
- **MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.**
- **PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.**
- **ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5°C A 28°C.**

## Validade

24 meses a partir da data de fabricação.



## Registro ANVISA

80750429012

## Responsável Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto  
CRQ IV - 04365163



## Indicaciones

El gel de ácido fosfórico al 37% está indicado para la preparación del tejido dental (dentina y esmalte) para la adhesión de materiales de restauración para uso exclusivo en consultorio dental.

## Presentación

Envase que contiene 03 jeringas de 3g.

## Composición

Agua destilada, espesante, ácido fosfórico, colorante azul, glicerol y sílice nanoparticulada.

## Instrucciones de uso

Preparar la región que será acondicionada con el producto (limpia y seca). Aplicar el acondicionador ácido sobre la superficie durante al menos 20 segundos (algunos productos adhesivos tienen tiempos de aplicación definidos por el fabricante). Después de la aplicación, retirar el producto con agua. Secar el área para iniciar el procedimiento.

## Advertencias y precauciones

- No permita que el producto entre en contacto con los ojos y la piel;
- Si entra en contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua y no frotar (consultar inmediatamente al médico);
- Producto de uso exclusivo profesional, mantener alejado de cualquier persona que no tenga la formación adecuada;
- Mantener alejado de niños;
- **MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE SIEMPRE CERRADO.**
- **PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **ALMACENAR EL PRODUCTO A**



**TEMPERATURAS ENTRE 5°C Y 28°C.**

## Validez

24 meses desde la fecha de fabricación.

## Registro ANVISA

80750429012

## Gerente Técnico

José Paulo Rocha Pereira Pinto  
CRQ IV - 04365163

